

PELLE COMPATTA E IDRATATA GRAZIE ALL'OSSIGENO

vitalità
tono e luce
al VISO

Inestetismi di viso, collo e décolleté?

Oggi c'è *élite Resolution Oxy Face*, un'apparecchiatura multifunzionale che sfrutta la sinergia di 5 efficaci tecnologie per esfoliare, ri-ossigenare, rigenerare, reidratare e riequilibrare la pelle. Un sistema col quale è possibile effettuare trattamenti personalizzati per lavorare in modo specifico sugli inestetismi, rendere i tessuti più compatti e illuminare l'incarnato.



- **MICRO DERMEOABRASIONE**
rimodella la superficie della pelle con una delicata abrasione meccanica.
- **OSSIGENO**
l'ossigenazione dei tessuti incrementa l'assorbimento dei sieri specifici *iSol* donando luminosità e tonicità alla pelle.
- **RADIO FREQUENZA**
azione Anti-Age, attivazione dei fibroblasti e produzione di collagene, elastina e acido ialuronico.
- **ELETTROPORAZIONE**
veicolazione profonda dei principi attivi contenuti nei sieri *iSol*
- **CROMO FREQUENZA**
trattamento finale di cromo benessere

cod. 1151

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

OSSIGENO

Azione Riossigenante

L'ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione tissutale, incrementa la tonicità della pelle e le dona un effetto più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su smagliature e cicatrici, favorisce l'equilibrio e l'idratazione cutanea. Il trattamento è privo di effetti collaterali. La speciale tecnologia **Overline** permette di eseguire questo trattamento isolando l'Ossigeno dagli altri gas presenti nell'atmosfera, per potenziarne l'effetto. L'Ossigeno viene erogato da un aerografo dotato di serbatoio, nel quale inserire i sieri **iSol**, specifici per effetti Anti-Age e idratanti.



VEDI PAG. 113



cod. 9690 - Aerografo

MICRO DERMOABRASIONE

Azione Esfoliante

La micro dermoabrasione di OVERLINE utilizza innovativi tamponcini diamantati di diversa granatura che si utilizzano per rimodellare la superficie della pelle e consiste nell'abrasione meccanica degli strati superficiali danneggiati dell'epidermide, senza intaccare la struttura della cute. Questa tecnica permette la rimozione delle cellule morte, favorisce il miglioramento della circolazione sanguigna e della naturale produzione di collagene. Stimola il ricambio cellulare ed è un passaggio importante perché predispone la pelle a ricevere il beneficio del trattamento effettuato con l'ossigeno.

RADIO FREQUENZA

Azione Rigenerante

La Radio Frequenza è efficace per combattere il rilassamento cutaneo, le rughe e i segni dell'invecchiamento. Agisce attraverso la Diatermia, che attiva i Fibroblasti (produttori di Collagene, Elastina e Acido ialuronico), provoca un aumento della quantità di ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare, l'eliminazione delle scorie cataboliche e stimola la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto liftante naturale e progressivo.

ELETTROPORAZIONE

Azione intensificante

L'Elettroporazione è una tecnica di veicolazione transdermica che agisce direttamente sui meccanismi cellulari, mediante impulsi elettrici modulabili e vibrazioni generate da speciali correnti dinamiche, di forme d'onda e frequenze diverse, che aprono nel derma dei "canali", permettendo di veicolare in profondità le sostanze selezionate in base al problema da risolvere. Con questa tecnica, assolutamente non dolorosa e non invasiva, è possibile far assorbire in profondità sostanze anche di notevole peso molecolare idrosolubili. L'elettroporazione sfrutta l'effetto di campi elettrici sia sui pori della pelle, i quali subiscono una dilatazione permettendo una maggiore permeabilità, sia sulle molecole composte, le quali vengono trasportate negli strati profondi sottocutanei dove possono svolgere un'azione diretta.

CROMO FREQUENZA

Mask Light Face Azione Riequilibrante

Trattamento di cromo benessere che utilizza diversi colori personalizzabili in base alle preferenze individuali, ottenendo così maggior relax e beneficio nella fase finale del trattamento, che associato alle maschere specifiche **iSol Chrome**, permette di intensificarne il risultato donando al volto un illuminante effetto finale.

come e perchè

consigli per i trattamenti con le tecnologie

- Aver cura di lavorare prima una metà del viso e poi l'altra per ottenere un effetto omogeneo.
- Detergere sempre la pelle con **iSol Cleansing Soft Mousse**, 2 in 1, distribuendo la mousse con movimenti circolari.



cod. 9440 Manipolo

MICRO DERMOABRASIONE

In base alla tipologia di pelle, l'apparecchiatura indica il colore del tamponcino monouso da utilizzare per la Micro Dermoabrasione. Applicare con una garza **iSol Pure Touch**, per asportare dalla pelle le particelle di grassi sovracutanei residui e per consentire al manipolo una migliore asportazione delle cellule morte. Regolare l'intensità di aspirazione e cominciare il trattamento, lavorare con delicati movimenti circolari su viso collo e décolleté per circa 15 minuti. Al termine applicare con un batuffolo di cotone la lozione ossigenante e lenitiva **iSol Relief** per riequilibrare l'epidermide.



cod. 9690 Aerografo

OSSIGENO

Inserire nel serbatoio dell'aerografo il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo tra **iSol Anti-Age Staminal Oxygen Serum** (Siero concentrato Anti-Age con cellule staminali vegetali) e **iSol Sensitive-Age Tri-Peptide Oxygen Serum** (Siero concentrato Anti-Age/Pelle sensibile al Tri-Peptide). Posizionarsi sulla parte da trattare e, mantenendo la distanza di circa un centimetro dalla pelle, erogare l'ossigeno con movimenti circolari, evitando la zona periorbitale, lavorando per circa 20 minuti. Al termine tamponare la parte per togliere i residui del prodotto.



cod. 9034 VISO-1

RADIO FREQUENZA

Prima di procedere al trattamento di Radio Frequenza, stendere col pennello l'emulsione **R.F. & Stim Face Emulsion** per permettere la massima conducibilità dell'energia, agevolare lo scorrimento del manipolo e favorire la tonificazione. Impostare la potenza della Radio Frequenza, posizionare il manipolo a contatto con la parte da trattare e successivamente premere start. Lavorare con movimenti rotatori per circa 20 minuti.



cod. 9700 Manipolo

ELETTROPORAZIONE

Inserire nel flacone dell'Elettroporatore il siero più indicato al trattamento da eseguire, scegliendo fra **iSol Resolution Age Lift Filler** e **iSol Resolution Pure Rebalance**. Posizionare l'elettrodo di massa (placca passiva) sul braccio e fissarlo con la fascia elastica. Prima di cominciare stendere un po' di siero sulla zona da trattare, questo permetterà di regolare meglio la fuoriuscita del prodotto. Posizionare il manipolo a contatto con la parte e poi premere start, aumentando gradualmente la potenza e regolando il flusso del prodotto. Eseguire piccoli movimenti rotatori o lineari in base all'area da trattare per circa 20 minuti.



cod. 9680 Maschera

CROMO FREQUENZA

Stendere una delle maschere cosmetiche **iSol** in base al risultato che si vuole ottenere, scegliendo tra: **iSol Age Lift Pink Mask** - Anti-Age; **iSol Hydra Sensitive Blue Mask** - idratante, **iSol Pure Rebalance Orange Mask** - riequilibrante. Poi procedere alla Cromo Frequenza selezionando sul monitor il colore della luce della Mask Light Face (rosa, blu, giallo o colore personalizzato) e regolarne l'intensità o la gradazione. Posizionare la Mask Light Face sul viso e lasciarla lavorare per 15 minuti. Al termine, rimuovere con cura la maschera **iSol** e, dopo aver deterso la parte, applicare la crema più indicata tra: **iSol Age Lift Crystal**; **iSol Hydra Sensitive Crystal**; **iSol Pure Rebalance Crystal**.

PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA


OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

ALL'OSSIGENO SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTA APPARECCHIATURA ESISTONO 15 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:



- Ossigeno
- Micro Dermoabrasione
- Radio Frequenza
- Elettroporazione
- Cromo Frequenza

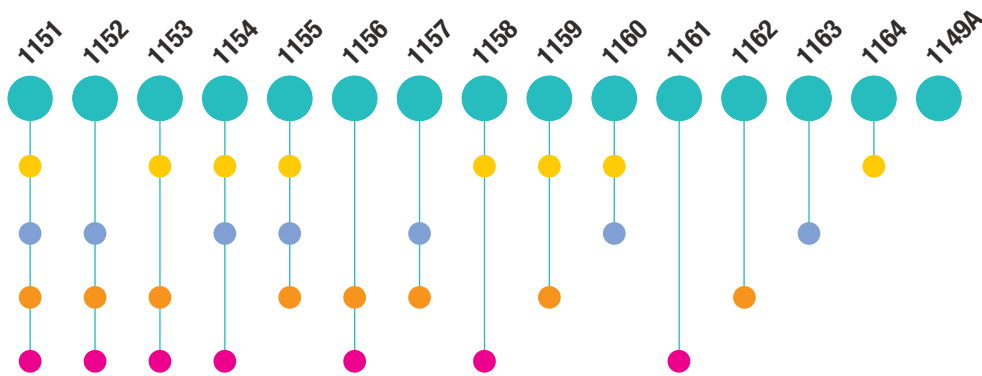

Esalta i risultati dei trattamenti Overline

- Prodotti disponibili anche nei formati **mantenimento**



● **ISO.FOAM.150 - 150ml**
CLEANSING
SOFT MOUSSE
 Detergente
 Dermocompatibile
 viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB
 Scrub in gel ai
 microgranuli di Jojoba

ISO.DER.100 - 200ml
PURE
TOUCH
 Pre Micro
 Dermoabrasione

ISO.DER.200 - 200ml
RELIEF
 Post Micro
 Dermoabrasione

ISO.POR.600 - 150ml
RESOLUTION
PURE
REBALANCE
 Siero Riequilibrante
 a Cristalli Liquidi per
 Elettroporatore viso

ISO.POR.650 - 150ml
RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER
 Siero Anti-Age a
 Cristalli Liquidi per
 Elettroporatore viso

● **ISO.CHROME.100**
250ml
AGE LIFT
PINK MASK
 Maschera gel
 Anti-Age (Rosa)

● **ISO.CHROME.200**
250ml
HYDRA
SENSITIVE
BLUE MASK
 maschera gel idratante/
 pelle sensibili (Blue)

● **ISO.CHROME.300**
250ml
PURE
REBALANCE
ORANGE MASK
 Maschera gel pelli
 impure (Arancione)

ISO.RF.100 - 250ml
R.F. & STIM
FACE
EMULSION
 Emulsione Anti-Age
 trattamento Radio
 Frequenza e Stimol

● **ISO.OXI.300**
10 strip da 10ml
SENSITIVE-AGE
TRI-PEPTIDE
OXYGEN
SERUM
 Siero concentrato
 Anti-Age con cellule
 staminali vegetali

ISO.OXI.400
10 strip da 10ml
 ● **SENSITIVE-AGE**
TRI-PEPTIDE
OXYGEN
SERUM
 Siero concentrato Anti-
 Age/Pelle sensibile al
 TRI-PEPTIDE

● **ISO.CRYSTAL.100**
250ml
AGE LIFT
CRYSTAL
 Crema intensiva Anti-
 Age ai Liposomi

● **ISO.CRYSTAL.200**
250ml
HYDRA
SENSITIVE
CRYSTAL
 Crema idratante pelli
 sensibili

● **ISO.CRYSTAL.300**
250ml
PURE
REBALANCE
CRYSTAL
 Crema riequilibrante
 detossinante