

ESFOLIA **RIOSSIGENA** RIGENERA E INTENSIFICA

Ossigeno al corpo



élite Resolution Body Oxy System è una delle soluzioni più interessanti e rivoluzionarie per prendersi cura del corpo. Le tecnologie che la compongono permettono di effettuare trattamenti personalizzati e programmabili, agendo in simultanea su tutti gli inestetismi.

● PEELING

Per facilitare il lavoro delle altre tecnologie, pratiche spazzole intercambiabili alimentate da un motore rotante permettono di effettuare, prima di ogni trattamento, un **Peeling** meccanico.

● OSSIGENO

Il trattamento Oxygen è il cuore di *élite Resolution Body Oxy System*. L'Ossigeno viene emesso dall'apparecchiatura stessa: speciali membrane disposte in tre camere effettuano la suddivisione dei vari gas che compongono l'atmosfera fino a rilasciare ossigeno puro, che, alimentato da **iSol Oxy Body** specifico per la cellulite*, per l'adipe e per la tonicità tissutale, permette di raggiungere considerevoli percentuali di ossigeno da stendere sull'epidermide.

● RADIO FREQUENZA

La **Radio Frequenza** oltre a dare maggiore elasticità ai tessuti, agisce direttamente sul pannicolo cellulitico.

● ELETTROPORAZIONE

L' **Elettroporazione** migliora la veicolazione dei principi attivi dei cosmetici utilizzati per ogni trattamento e può essere impiegata anche sull'adipe.

La sinergia di queste quattro tecnologie è sicuramente tra le più indicate per contrastare gli inestetismi causati dalla cellulite e il rilassamento cutaneo, ma garantisce anche un'efficace azione di preparazione per i trattamenti anti adipe.

cod. **3111**

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

PEELING

Azione Esfoliante

Il peeling svolge un'azione di pulizia più profonda, eliminando le cellule morte e i depositi di impurità. Con questo passaggio si ottiene il rinnovamento degli strati superficiali della pelle e l'attenuazione degli inestetismi, preparando la parte a ricevere i benefici dei successivi trattamenti.




cod. 9405 - Manipolo peeling • cod. 9332 Spazzola Capra • cod. 9331 Spazzola Setola

OSSIGENO

Azione Riossigenante

L'ossigeno è rinvigorente e rassodante, stimola la respirazione cellulare, migliorando la tonicità della pelle e donandole un aspetto più elastico, compatto e luminoso. Riduce le irritazioni, agisce su smagliature e cicatrici, favorisce l'equilibrio e l'idratazione cutanea, decongestiona ed è anche un ottimo antinfiammatorio e antibatterico. Il trattamento non è invasivo ed è privo di effetti collaterali.

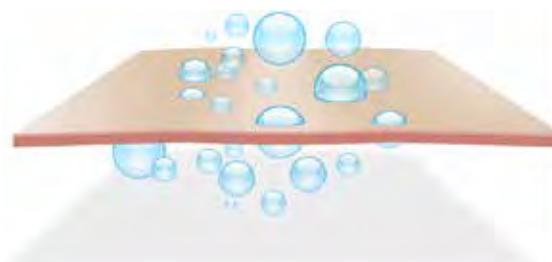

cod. 9692 - Aerografo

RADIO FREQUENZA

Azione Rigenerante

La Radio Frequenza sfrutta il principio della Diatermia, che consente la vasodilatazione e l'aumento dell'ossigeno trasportato ai tessuti, velocizza il metabolismo cellulare e stimola la produzione di Collagene, Elastina e Acido ialuronico, rendendo la pelle più elastica e compatta. Due specifici manipoli permettono di eseguire trattamenti di RF per cellulite* e per adipe.



*per gli inestetismi causati dalla cellulite



cod. 9034CORPO-1 Manipolo Bipolare




cod. 9034CORPO-7 Manipolo Multipolare

ELETTROPORAZIONE

Azione Intensificante

L'Elettroporazione, attraverso l'emissione di impulsi elettrici, contribuisce ad aprire canali nel derma per veicolare in profondità i principi attivi dei cosmetici utilizzati, scelti in base all'inestetismo da trattare.

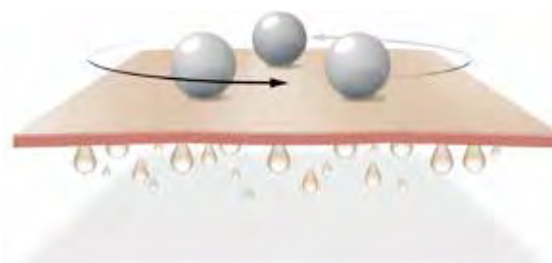

cod. 9750 - Manipolo Elettroporazione • cod. 9751 - Contenitore

il meglio in 4 fasi



● 1° ESFOLIANTE

PEELING

Effettuare la detersione delle parti da trattare con *Cleansing soft mousse*, proseguire con l'applicazione del *Jojoba Scrub* utilizzando il programma Peeling Brushes e scegliendo la spazzola più indicata al tipo di pelle. Al termine rimuovere i residui dello Scrub con manopole (teli in TNT) inumidite in acqua tiepida. Asciugare bene la pelle e proseguire il trattamento.

● 2° RIOSSIGENANTE

OSSIGENO

Versare nell'apposito contenitore dell'aerografo circa 20ml di miscela di ossigeno attivo e principi attivi, *Oxygen Body*. Procedere con il trattamento. Lasciare in posa il prodotto per qualche minuto (nel frattempo pulire l'aerografo) e risciacquare con acqua fresca la zona trattata ed asciugare bene tamponando la pelle con kleenex.

● 3° RIGENERANTE

RADIO FREQUENZA CELLULITE* MANIPOLO BIPOLARE

Stendere *iSol* Emulsione per RF corpo ed effettuare il trattamento con movimenti lenti e rotatori per consentire all'energia di penetrare efficacemente all'interno del tessuto.

● 3° RIMODELLANTE

RADIO FREQUENZA ADIPE MANIPOLO MULTIPOLARE

Stendere *iSol* Emulsione per RF corpo ed effettuare il trattamento con movimenti lenti e rotatori per consentire all'energia di penetrare efficacemente all'interno del tessuto.

● 4° INTENSIFICANTE

ELETTROPORAZIONE

Inserire nel flacone da avvitare al manipolo dell'Elettroporazione, 15/20ml di Siero *iSol Resolution Body Cell* specifico per cellulite*/adipe o siero body Tone per ottenere un'azione tonificante dei tessuti. Bagnare la placca passiva con acqua e posizionare sul corpo vicino alla zona da trattare, fermandola con l'apposita fascia e procedere al trattamento con movimenti rotatori concentrandosi su piccole aree.

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



Dopo aver selezionato le zone da trattare, il software indica tutti i parametri del trattamento.



Schermata che indica la modalità di un trattamento.



Schermata finale con i dettagli di esecuzione trattamento.

iSol.
SPECIAL BEAUTY



Esalta i benefici dei trattamenti Overline

ISO.FOAM.150 - 150ml
**CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

ISO.SCRUB.200 - 250ml
**JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

ISO.POR.550 - 250ml
**RESOLUTION
BODY TONE**
Siero ai Cristalli
Liquidi elasticizzante,
tonificante per
Elettroporatore corpo.

ISO.POR.500 - 250ml
**RESOLUTION
BODY CELL**
Siero a Cristalli Liquidi
Cellulite*
per Elettroporatore
corpo

ISO.POR.650 - 150ml
**RESOLUTION
AGE LIFT
FILLER**
Siero Anti-Age a
Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.POR.600 - 150ml
**RESOLUTION
PURE
REBALANCE**
Siero Riequilibrante
a Cristalli Liquidi per
Elettroporatore viso

ISO.RF.500 - 500ml
**R.F. BODY
EMULSION**
Emulsione corpo per
Radio Frequenza

ISO.OXI.500 - 250ml
**OXYGEN
REMODELLING
BODY
SERUM**
Siero concentrato per
trattamento Ossigeno
Corpo

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml
**HYDRABODY
CELL**
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml
**HYDRABODY
FIT**
Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante