

TONICA E LEGGERA CON IL **PRESSO MASSAGGIO** E LA FISIOSTIMOLAZIONE RIMODELLANTE

più tonicità
più vitalità



élite Resolution Stim Massage è un'apparecchiatura studiata per contrastare le problematiche di ritenzione idrica, per attenuare gli inestetismi causati dalla cellulite* e rimodellare il corpo. Agisce con due efficaci tecnologie: il **Presso Massaggio** e la **Fisiostimolazione Modellante**.

Il **Presso Massaggio** contribuisce al ripristino della funzionalità veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un'attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l'ossigenazione dei tessuti e previene la formazione della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso di benessere e di leggerezza.

La **Fisiostimolazione Modellante**, grazie ai bio impulsi calibrati, ridefinisce la figura, combatte il rilassamento cutaneo, rendendo la pelle più compatta ed elastica, e tonifica la muscolatura. Inoltre facilita la liberazione dei ristagni liquidi, l'eliminazione delle tossine e l'assimilazione dei principi attivi delle bende **iSol**.

élite Resolution Stim Massage abbina le due tecnologie in un unico trattamento, ma è possibile scegliere di utilizzarle anche individualmente. In entrambi i casi svolge un lavoro mirato sulle diverse problematiche estetiche e su tutti i distretti del corpo, grazie a programmi dedicati per agire su cellulite*, adipe, rilassamento cutaneo superficiale e dei tessuti sottostanti.



cod. 3132/12

Dimensioni in mm L480 x P440 x H1140



Memory Card 9465

PRESSO MASSAGGIO

Azione drenante e rivitalizzante

Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità veno-linfatica, favorendo la circolazione periferica. Svolge un'attività drenante, riducendo il gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante, rivitalizzante, migliora l'ossigenazione dei tessuti e previene la formazione degli inestetismi della cellulite*. Questo trattamento è particolarmente rilassante e genera un senso di benessere e di leggerezza.

12 SETTORI

I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici, corpetto regolabile lateralmente; i settori delle braccia partono dalla mano e si dividono in 4 settori con una camera specifica per i gangli linfatici sotto ascella. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia, con camere d'aria dei settori intercambiabili.

8 programmi corpo generale

Trattamenti che permettono di lavorare contemporaneamente gli arti inferiori e gli arti superiori. Programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.

14 programmi gambe

Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.

4 programmi braccia

Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo scarico di liquidi, rimodellando la parte trattata.

FISIOSTIMOLAZIONE MODELLANTE

Azione tonificante e rimodellante

La Fisiostimolazione Modellante utilizza Frequenze che variano da 30 a 80 Hz ideali per un'azione tonificante consigliata a chi tende ad avere i tessuti rilassati. Agendo su tutta la lunghezza dei muscoli, mantiene la pelle elastica. Il trattamento inoltre aiuta a stimolare il flusso della linfa al fine di migliorare il transito, aiutando a liberare gli ingorghi che si sono creati, accelerando ulteriormente il deflusso.

8 SETTORI

I nuovi gambali per Presso Massaggio sono suddivisi in piede, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici. I gambali sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba o delle braccia, con camere d'aria dei settori intercambiabili.

14 programmi gambe

Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Programmi diversificati in base alle singole esigenze e problematiche della cliente.

VEDI PAGINA 46



VEDI PAGINA 46



SILENT TECHNOLOGY

Motore di nuova generazione che rende l'apparecchiatura più silenziosa ed efficiente nel tempo con una durata di 2500 ore pari a 5000 trattamenti.

fasi trattamento rimodellante preparatorie



VEDI PAG 116

BENDAGGI

Applicare il Bendaggio *iSol* specifico in base all'inetestismo da trattare, avvolgere partendo dalla caviglia o dal ginocchio cercando di non lasciare spazi scoperti.



cod. 9039/N Fascia conduttiva

FISIOSTIMOLAZIONE


Applicare la prima fascia in gomma conduttiva partendo dal basso sino ai fianchi e tornare verso il basso sul secondo arto. La seconda fascia avvolgerà la parte superiore (il software mostrerà degli schemi indicativi).



cod. 9435 Panta Presso


PANTA PRESSO

Far indossare un Panta-presso in cartene al fine di proteggere il gambale dal prodotto cosmetico, far stendere quindi la cliente sul lettino.

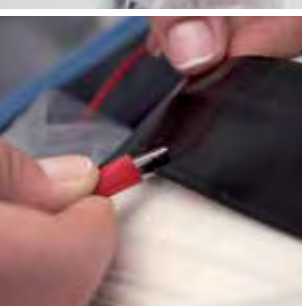

ELETTRODI

Collegare gli elettrodi (a coccodrillo) come visualizzati all'interno dell'apparecchiatura e procedere con l'inizio trattamento.

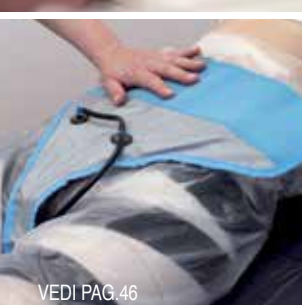

VEDI PAG.46

GAMBALE

Infine far indossare il gambale per eseguire il trattamento combinato. I trattamenti preimpostati, divisi in 4 fasi, avranno una durata di 32 minuti.

TOUCH SCREEN 10" LCD DISPLAY

CAPILLARE CONSULTAZIONE DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI

Permette di visualizzare immagini, programmi, dati cliente, parametri e percorsi di lavoro garantendo una consultazione capillare dei trattamenti e di tutte le funzioni.



Sceita dei programmi



posizionamento fasce conduttive
per fisiostimolazione




Schermata finale con i dettagli
di esecuzione trattamento.

PERSONALIZZA L'APPARECCHIATURA

OVERLINE DISEGNA LE SUE APPARECCHIATURE SU MISURA PER TE

AL PRESSO MASSAGGIO SI POSSONO AGGIUNGERE UNO O PIÙ TRATTAMENTI PER RISPPECCHIARE LE ESIGENZE DI OGNI OPERATRICE

CON QUESTA TECNOLOGIA ESISTONO 4 COMBINAZIONI DIFFERENTI, SCEGLI TRA:

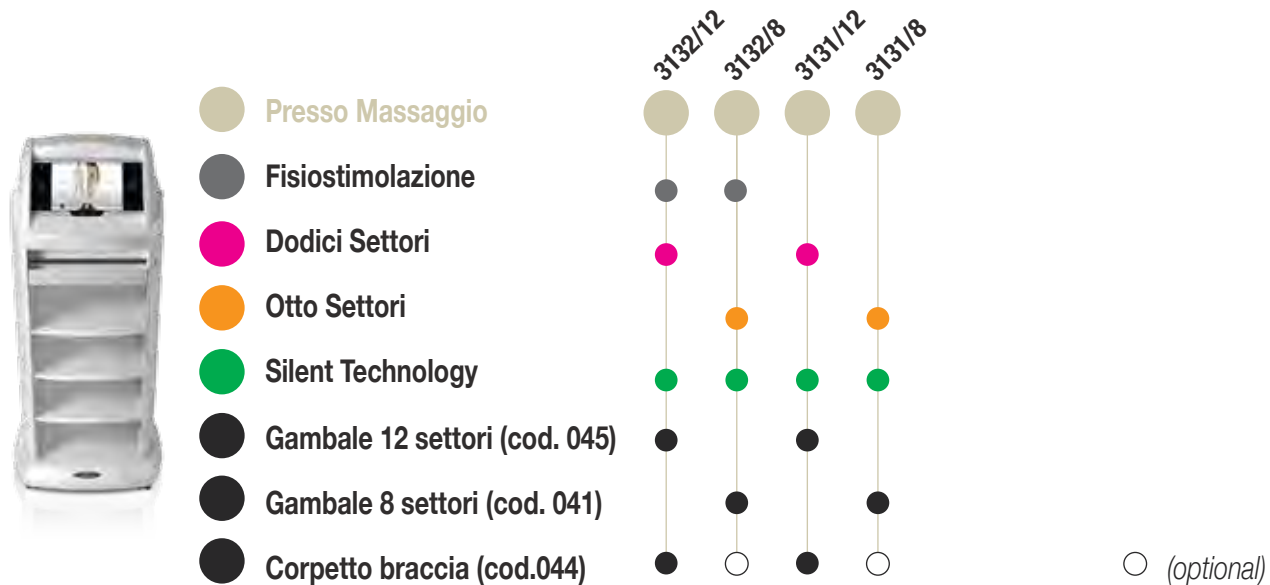

dettagli gambali pag. 46 - apparecchiature Presso Massaggio Xilia pag. 44



Bendaggi monouso

**ISO.BE.005 CF
THERM
SOLUTION GEL**
Adipe, riattivante

**ISO.BE.015CF
FRESH
SOLUTION GEL**
Tonificante, defaticante,
cellulite*

**ISO.BE.030 CF
ALGA FUCUS E
SALI DEL MAR
MORTO**
Drenante, Cellulite*
adipe

**ISO.BE.025CF
ACIDO
IALURONICO**
Tonificante,
elasticizzante

**ISO.BE.050CF
VITAMIN**
Microcircolo, adipe,
elasticizzante

**ISO.BE.040CF
REDUCING**
Effetto snellente

**ISO.MUD.100 - 1000ml
FANGO-CELL
INTENSIVO**
Fango crema con argilla
bianca Fieno Greco e
SALI DEL MAR MORTO

**ISO.MUD.200 - 1000ml
FANGO-SLIM
INTENSIVO**
Fango crema con argilla
verde ALGHE ATTIVE e
TE VERDE

**ISO.FOAM.150 - 150ml
CLEANSING
SOFT MOUSSE**
Detergente
Dermocompatibile
viso&corpo

**ISO.SCRUB.200 - 250ml
JOJOBA FACE
& BODY
SCRUB**
Scrub in gel ai
microgranuli di Jojoba

**ISO.LIPO.100 - 1000ml
CELL-LIPO
GEL**
Gel conduttore cellulite*
e adipe con Guarana**

**ISO.TONE.200 - 1000ml
DRENA-TONE
GEL**
Gel conduttore effetto
tonificante riattivante

MANTENIMENTO

ISO.BODY.100
Airless 200ml
**HYDRABODY
CELL**
Emulsione corpo
cellulite* / idratante

ISO.BODY.200
Airless 200ml
**HYDRABODY
FIT**
Emulsione corpo effetto
tonificante / idratante
con Fieno Greco